


BIOLUX PRO MINI



Acondicionamiento Físico

1. Coloca la banda con la luz en contacto directo con la columna vertebral y posteriormente en el abdomen. Sin elástico.
2. La luz debe cubrir la zona mencionada en su totalidad de ser posible.
3. Presiona  dos veces para activar la luz roja e infrarroja.
4. Permite que el equipo se apague (15 minutos) y repite este proceso una vez más para un total de 30 minutos.
5. Debes hacerlo recostado(a). Puedes hacerlo diariamente.



Hidratarse correctamente mejora los resultados
Esto no sugiere ni sustituye ningún tratamiento médico

