



BIOLUX PRO MINI

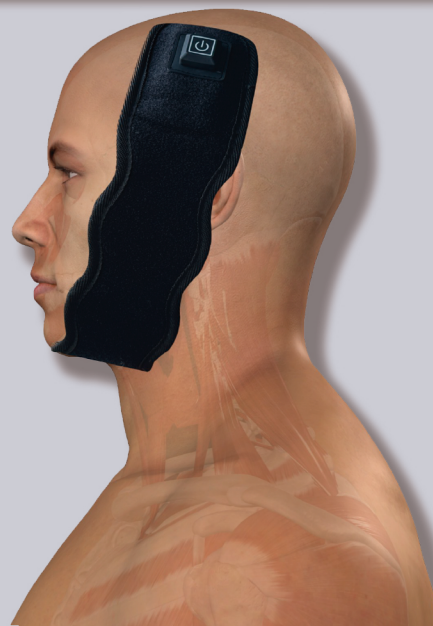

Bruxismo, Apretar o Rechinar los Dientes

1. Coloca la banda por debajo de la barba ajustándola con el elástico por la parte superior de la cabeza.
2. No necesita estar apretada, la luz debe cubrir la zona por debajo y delante de los oídos.
3. Presiona  dos veces para activar la luz roja e infrarroja.
4. Permite que el equipo se apague (15 minutos), repite este proceso al despertar y antes de dormir.
5. Si persisten las molestias consulta a un profesional de la salud.



Hidratarse correctamente mejora los resultados
Esto no sugiere ni sustituye ningún tratamiento médico

