


# BIOLUX PRO MINI



## Cabeza

1. Coloca la banda por arriba de los ojos ajustándola con el elástico por nuca.
2. No necesita estar apretada, la luz debe cubrir la zona por arriba de los oídos y la frente.
3. Presiona  dos veces para activar la luz roja e infrarroja.
4. Permite que el equipo se apague (15 minutos), repite este proceso dos veces al día por tres días.
5. Al terminar el proceso, repítelo con la banda al revés, ajustándolo con el elástico en la frente.



Hidratarse correctamente mejora los resultados  
Esto no sugiere ni sustituye ningún tratamiento médico

