


BIOLUX PRO

MINI



Codo

1. Coloca la banda con la luz en contacto directo y alrededor del codo ajustándola con el elástico.
2. No necesita estar apretada, la luz debe cubrir encima, por arriba y por debajo del codo.
3. Presiona  dos veces para activar la luz roja e infrarroja.
4. Permite que el equipo se apague (15 minutos), repite este proceso dos veces al día.
5. Puedes realizar otras actividades mientras lo utilizas.



Hidratarse correctamente mejora los resultados
Esto no sugiere ni sustituye ningún tratamiento médico

