



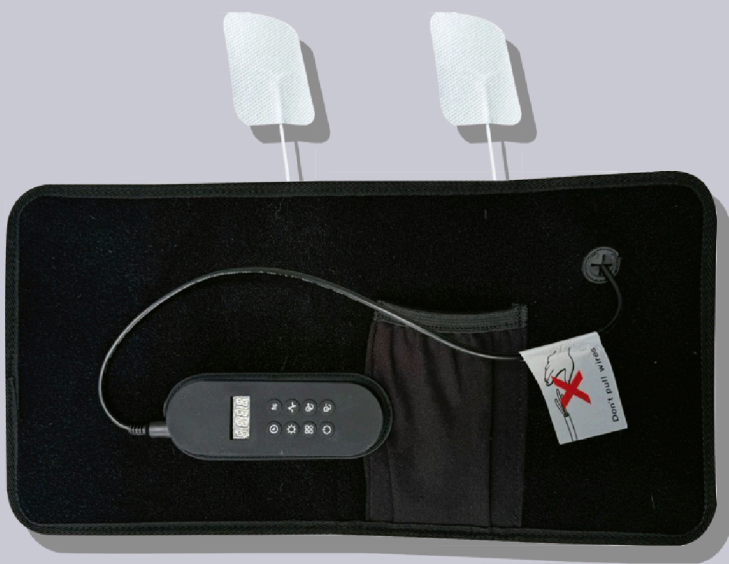


BIOLUX PRO


MAX CON EMS

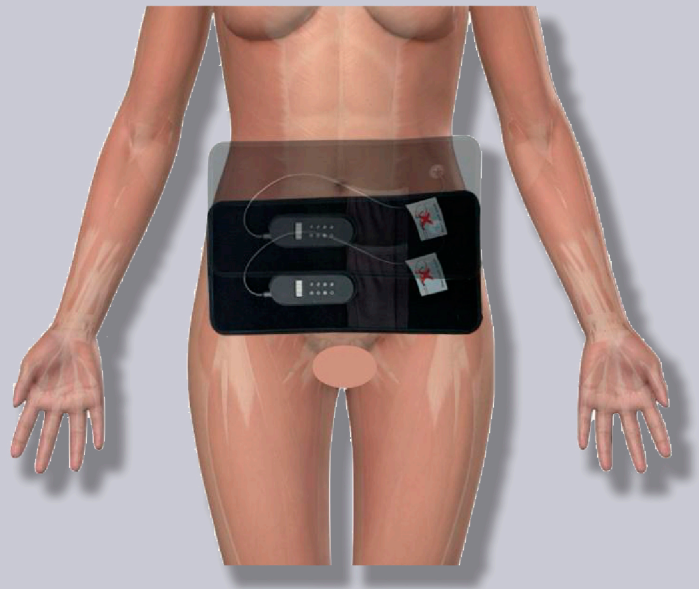

Cólicos e Inflamación por Menstruación

1. Coloca BioluxPro en el área que más te afecta. Puede ser más arriba o más abajo como lo señala la imagen.
2. En este caso no se recomienda el uso de los electrodos.
3. Presiona  selecciona ALL.
4. Presiona  selecciona 20 mins.
5. Presiona  selecciona L10.
6. Presiona F en 40Hz. para pulsar la luz.
7. Repite este proceso hasta tres veces al día en caso de ser necesario.



 Hidratarse correctamente mejora los resultados
Esto no sugiere ni sustituye ningún tratamiento médico 