


BIOLUX PRO MINI



Cuello

1. Coloca la banda por detrás del cuello dejándola caer hacia el pecho sin usar el elástico.
2. Mantener relajados los hombros ayudará a un mejor resultado.
3. Presiona  dos veces para activar la luz roja e infrarroja.
4. Permite que el equipo se apague (15 minutos), repite este proceso dos veces al día por cinco días.
5. Si persisten las molestias, consulta a un profesional de la salud.



Hidratarse correctamente mejora los resultados
Esto no sugiere ni sustituye ningún tratamiento médico

