


# BIOLUX PRO MINI



## Hombro

1. Coloca la banda con la luz en contacto directo y alrededor del hombro ajustándola con el elástico de ser necesario.
2. No necesita estar apretada, la luz debe cubrir encima, por arriba y por debajo del hombro.
3. Presiona  dos veces para activar la luz roja e infrarroja.
4. Permite que el equipo se apague (15 minutos) y repite este proceso tres veces al día por cinco días.
5. Puedes realizar otras actividades mientras lo utilizas.



Hidratarse correctamente mejora los resultados  
Esto no sugiere ni sustituye ningún tratamiento médico

