



# BIOLUX PRO MINI

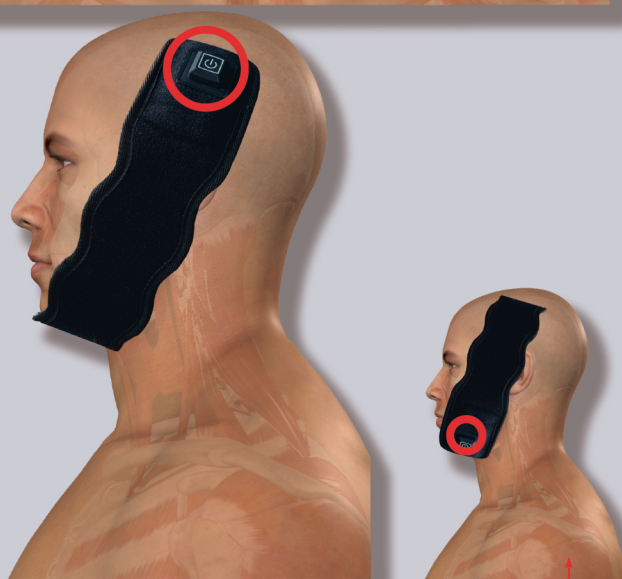

## Músculos de la Articulación

1. Coloca la banda por debajo de la barba ajustándola con el elástico por la parte superior de la cabeza.
2. No necesita estar apretada, y la luz debe cubrir la zona por debajo y delante de los oídos.
3. Presiona  dos veces para activar la luz roja e infrarroja.
4. Permite que el equipo se apague (15 minutos), repite este proceso dos veces al día por tres días.
5. Al terminar el proceso, repítelo con la banda al revés, ajustando el elástico en la barba.



Hidratarse correctamente mejora los resultados  
Esto no sugiere ni sustituye ningún tratamiento médico

