






BIOLUX PRO

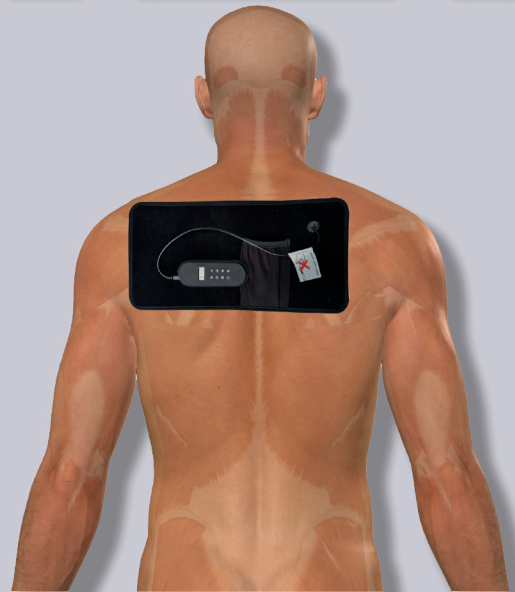

MAX CON EMS



Quemaduras, irritación de la piel, piquetes de mosco

1. Coloca Bioluxpro en el área afectada. Puedes hacerlo recostado.
2. En ninguno de estos casos son necesarios los electrodos.
3. Presiona 
4. Presiona  selecciona 660.
5. Presiona  selecciona 10 mins.
6. Presiona  selecciona L09.
7. En caso de sentir mucho calor durante el proceso, presiona F en 40Hz. para pulsar la luz.
8. Repite este proceso hasta tres veces al día en caso de ser necesario.



 Hidratarse correctamente mejora los resultados 
Esto no sugiere ni sustituye ningún tratamiento médico