


BIOLUX PRO MINI



Quemaduras, irritación de la piel, piquetes de mosco

1. Coloca la banda con la luz en contacto directo y alrededor de la zona afectada ajustándola con el elástico si es necesario.
2. No necesita estar apretada, la luz debe cubrir encima, por arriba y por debajo de la zona a tratar.
3. Presiona  una sola vez para activar la luz roja.
4. Permite que el equipo se apague (15 minutos), repite este procedimiento hasta tres veces al día.
5. Puedes realizar otras actividades mientras lo utilizas.



Hidratarse correctamente mejora los resultados
Esto no sugiere ni sustituye ningún tratamiento médico

